



AȚĂ CHIRURGICALĂ POLIAMIDĂ NESTERILĂ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Producător: SC AURA SA, 410473 Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 9-11

Sortimente:

Nr. ață AURA (USP)	Masă lineară [g/1000 m]	Diametru [mm]	Rezistență la rupere [daN]
5 (6)	255 +/- 13	0.800 - 0.899	min. 7.0
6 (5)	255 +/- 13	0.700 - 0.799	min. 7.0
7 (2)	195 +/- 10	0.500 - 0.599	min. 5.5
8 (1)	125 +/- 6	0.400 - 0.499	min. 3.5
9 (0)	90 +/- 5	0.300 - 0.399	min. 2.5
10 (3-0)	60 +/- 3	0.200 - 0.249	min. 1.5

Domeniul de utilizare a firului chirurgical AURA:

Firul se folosește în chirurgie generală, ginecologie și obstetrică și în ortopedie.

Pentru intervenții chirurgicale în sistemul nervos central și cardiovascular NU SE POATE UTILIZA!!!

Firul chirurgical AURA este un produs de unică folosință!

Materiale utilizate și descrierea tehnică:

Ața chirurgicală este un produs împletit fabricat din fire de poliamidă 6 (nylon).

Igiena, sterilizarea produsului:

Firul chirurgical AURA nu se comercializează sterilizat.

TREBUIE STERILIZAT înainte de utilizare!!!

Sterilizarea firului chirurgical AURA trebuie efectuată de către utilizator. Vă recomandăm, ca sterilizarea să se efectueze împreună cu instrumentele chirurgicale în atoclavă.

Parametrii: T=134 C, p=2,5 bar, t=30 minute.

Cerințe de depozitare:

Firul chirurgical AURA este sensibil la lumină UV și umezeală. Așadar, pentru evitarea degradării firului locul de depozitare trebuie ferit de umiditate și lumină!

Prevederi de gestionare a deșeurilor:

Produsul pregătit pentru utilizare, sterilizat, dar nefolosit, trebuie gestionat cu restul deșeurilor spitalicești.

Este interzisă aruncarea lui în tomberon!

Produsul nefolosit, expirat nu este deșeu periculos, nu trebuie neutralizat!



NESTERIL