

Descriere produs: SUPRASEPT - dezinfectant concentrat

Producător: Hexi Pharma

Dezinfectant de nivel înalt recomandat pentru dezinfectia și curățarea echipamentelor medicale (aparatură și instrumentar medical) și a suprafețelor în secțiile cu risc septic.

Dezinfectant de elecție pentru dezinfectia terminală.

Compoziție: 12% glutaraldehidă, 7% clorură de didecildimetil amoniu, tensioactivi neionici, alcooli, inhibitori de coroziune, parfum, excipienți.

Indicații – Mod de utilizare:

Dezinfecția și curățarea echipamentelor medicale (aparatură și instrumentar medical), din orice tip de material; predezinfecția echipamentelor care vor fi sterilizate;

Dezinfecția și curățarea suprafețelor în secțiile cu risc septic din unitățile sanitare (bloc operator, secții de terapie intensivă, hemodializă, săli de tratament, saloane pacienți, grupuri sanitare, etc.);

Dezinfectant de elecție pentru dezinfecția terminală (ciclică) a sălilor de operații, saloanelor de boli contagioase sau cu risc septic, grupurilor sanitare, etc – se face în absența personalului, astfel: concentrație de 0,25%, timp de contact 30 și 60 minute; concentrație de 0,5%, timp de contact 15 și 30 minute.

Efect dezinfectant:

Efect dezinfectant complet după 30 de minute de contact cu soluția 0,25% sau 15 minute cu soluția 0,5%, în prezența încărcăturii proteice.

Activitate bactericidă: pe tulpinile de referință *Staphylococcus Aureus* și *Pseudomonas Aeruginosa*, *Staphylococcus Epidermidis*, *Escherichia Coli*, *Proteus Vulgaris*, etc.;

Activitate fungică: pe tulpinile de referință *Candida Albicans* și *Aspergillus Niger*, în concentrație de 0,25% la un timp de acțiune de 15 minute și în concentrație de 0,5% la un timp de acțiune de 10 minute;

Activitate micobacterică: produsul Suprasept, diluat 0,25% la un timp de contact de 30 minute și 0,5% la un timp de contact de 15 minute, prezintă activitate micobacterică atât în condiții de curățenie, cât și în condiții de murdărie, față de tulpinile de referință *Mycobacterium Terra* și *Mycobacterium Avium*;

Activitate virulică:

inactivează virusurile HIV, Hepatic B și C; se recomandă utilizarea la concentrația 0,25% – timp de contact de 30 minute și concentrația de 0,5% – timp de contact 15 minute;

prezintă activitate virulică, astfel: încărcătura organică scăzută la concentrația de 0,25%, timp de acțiune 30 minute pe Adenovirus; încărcătura organică scăzută la concentrația de 0,25%, timp de acțiune 30 minute pe Poliovirus; încărcătura organică ridicată la concentrația de 0,25%, timp de acțiune 30 minute pe Adenovirus; încărcătura organică ridicată la concentrația de 0,25%, timp de acțiune 30 minute pe Poliovirus;

Activitate sporicidă: concentrație de 0,25% la un timp de contact de 30 și 60 minute și concentrația de 0,5% la un timp de contact de 15 și 30 minute, pe tulpinile *Bacillus Subtilis* și *Bacillus Cereus*.

Caracteristici:

Compatibil cu orice tip de material: ciment, mozaic, linoleum, gresie, lemn lustruit, faianță sau vopsea de ulei, ceramică, porțelan, sticlărie de laborator, plexiglas sau acrilice, cauciuc, metal (conține anticorozivi), fibră optică, etc.;

Eficiența se menține și în prezența materiilor organice proteice;

Produsul diluat, utilizat la concentrațiile recomandate, nu este coroziv (inhibitorii de coroziune limitează efectul coroziv al produsului utilizat în soluție de lucru);

Este ușor de preparat, iar proprietățile dezinfectante nu sunt modificate de gradul de duritate al apei, de temperatura din mediul de lucru, lumină sau de prezența concomitentă a altor detergenți de tip cationic sau neionic;

Produsul este biodegradabil în proporție de peste 98%;

Personalul care efectuează nebulizarea nu este expus riscului cancerigen, ca în cazul formolului.

Condiționare: flacoane de polietilenă de înaltă densitate de 1 litru sau 5 litri.

Garanție: produsul are valabilitate 36 de luni de la data fabricației.

Specificații tehnice: SUPRASEPT - dezinfectant concentrat

dezinfectare medicală

Suprafețe, Instrumentar